



Skellefteå 2020-09-30



### Information gällande Nutrisafe 2 – Diskbar spruta för hemsjukvård 2,5ml

Tyvär har vårt lager av Nutrisafe 2 diskbar spruta 2,5ml (art.nr **1012.02**) tagit slut. Denna produkt har utgått och kommer att ersättas med en annan, men tyvär är inte de nya sprutorna tillgängliga ännu.

### Som ersättning får ni istället nedan produkt:

Art.nr **1015.022** (2,5ml)

Denna spruta är också tillverkad av Codan och identisk med **1012.02** sprutan, men i texten på förpackningen står det en överstruken tvåa, dvs avsedd för engångsbruk. Dessa engångssprutor kan ändå diskas, då trycket är bättre än på våra andra engångssprutor med artikelnummer 1015.023, var god se diskanvisning på nästa sida.

Med vänlig hälsning

**Julia Wehrend**

Upphandlings- och avtalskoordinator



# Diskanvisning

## Nutrisafe 2 sprutor

art.nr 1012.xx och 1015.xx2

Sprutorna kan användas under 7 dagar eller diskas 30 gånger. Skall diskas direkt efter användning. Använd varmt vatten och diskmedel.

- 1) Dra kolven in och ut flera gånger för att på så sätt skölja igenom sprutan med diskvatten. Detta skall göras tills inga synliga rester av mat eller medicin finns.
- 2) Dra ut kolven från hylsan och tvätta båda dessa grundligt med varmt vatten och diskmedel. Viktigt att alla delar av sprutan: sprutspets, hylsa och kolv blir noggrant rengjorda.
- 3) Skölj hylsa och kolv under kallt kranvatten. Skaka ur överskottsvatten och torka därefter samtliga sprutkomponenter, insida och utsida, med rent hushållspapper.
- 4) Låt kolv och hylsa lufttorka innan de monteras ihop.

### Ytterligare rengöring

#### (vid behov)

Produkten tål även följande rengöring (komponenterna separerade)

- 1) Diskmaskin (endast 60ml sprutorna, Sprutspetsen uppåt)
- 2) Nedsänkta i kokande vatten (3 minuter)
- 3) Nedsänkta i kall steriliseringsvätska (Läs instruktionerna från tillverkaren av steriliseringsvätskan. Sprutkomponenterna får inte förvaras i steriliseringsvätskan)

#### Viktigt!

Sprutorna måste rengöras grundligt innan ovanstående processer genomförs.