


Snabbguide för avläsning av urinteststickor på Clinitek Status

Test av urinalyssticka

Testet startas från huvudskärmen
Välj.

 Om du behöver mer information om hur du använder och förvarar analysstickorna läser du den information som bifogats i förpackningen med stickorna.

Tryck på **Analysera sticka** om du vill utföra test av en urinalyssticka.

Nästa skärm som visas är **Användar-ID.**

Det finns två alternativ under Användar-ID: **Senaste användare** och **Ange nytt användar-ID.**

Alternativ 1: Senaste användare

Om det här alternativet aktiveras visas den användare som senast angav sitt ID på skärmen i nedre högra delen av rutan. Om du är den här användaren trycker du på knappen **Senaste användare** för att fortsätta.

Alternativ 2: Ange nytt användar-ID


För att ange information för en ny användare trycker du på knappen **Ange nytt användar-ID.** Nästa skärm som visas är **Ange användar-ID.**

Nästa skärm som visas är **Patientinformation.**

Det finns två alternativ under Patientinformation: **Hämta patientdata** och **Ange ny patient.**

Alternativ 1: Hämta patientdata

För att kunna slå upp tidigare patienter trycker du på **Hämta patientdata.**

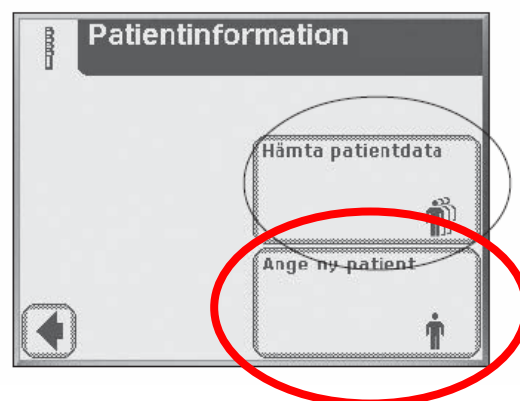

Alternativ 2: Ange ny patient

För att kunna ange information för en ny patient trycker du på knappen **Ange ny patient.** Nästa skärm som visas är **Ange patientnamn.**

Nästa skärm som visas är **Ange patient-ID**. Använd tangentbordet för att mata in patientidentifikation med högst 13 tecken. Tryck på **OK** när du är klar med patient-ID:t och vill fortsätta till nästa skärm.



Nästa skärm som visas är **Förbereda testet**.

Kontrollera att testslädsinsatsen har hållaren för reagenssticken vänd uppåt.



Ha också teststicken, urinprovet och en pappershandduk till hands.

Tryck på knappen **START**.

Nästa skärm som visas är en annan skärm med titeln **Förbereda testet**. På den skärmen får du en beskrivning av hur du skall göra i ordning teststicken.



En timer visar hur mycket tid du har kvar att utföra de olika stegen.

1 Doppa reagenssticken i urinprovet så att alla testfält blir våta. Ta omedelbart upp stickan ur urinen.

2 Dra stickans kant mot provbehållarens sida när du tar upp den.

3 Låska av genom att stryka stickans kant mot pappershandduken för att avlägsna överskottsurin.

4 Placera reagenssticken i slädens kanal med testfälten uppåt. Skjut in stickan till kanalens slut.

När nedräkningen av de åtta sekunderna är slut dras testsläden och stickan automatiskt in i analysinstrumentet.



Om analysinstrumentet har ställts in för automatisk utskrift av resultaten visas skärmen **Utskrift** tills utskriften är klar (annars visas skärmen **Resultat**).

