




Slå på instrumentet genom att hålla knappen **På/Av** intryckt i mer än 5 sek.




Tryck på **Patienttest**

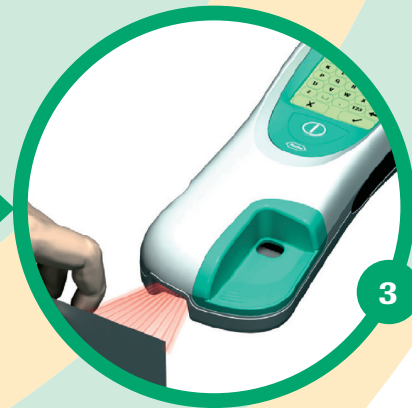


Scanna **patient-ID**




Sätt i en testremsa.
För in remsan **snabbt** med en jämn rörelse.

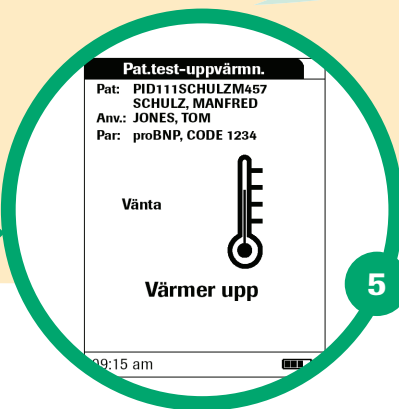

Testremsan värms upp. **Vänta.**

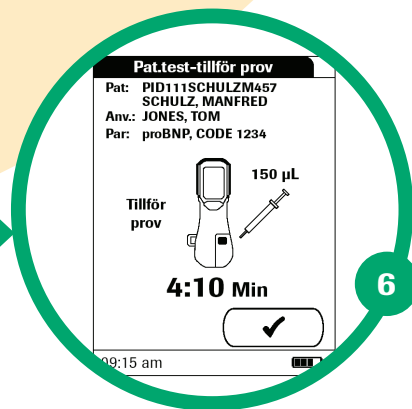


Pipettsymbolen betyder att instrumentet väntar på att blod skall tillföras. **Tillför blod.**

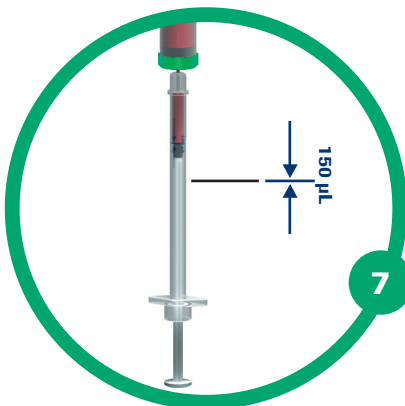

Dra exakt **150 µL** blod från det hepariniserade venröret (till den blå markeringen på applikatorn).



Tillför hela provet till applikationsfältet på testremsan. Tillför **hela** provet i en **jämn** ström, utan **uppehåll**.

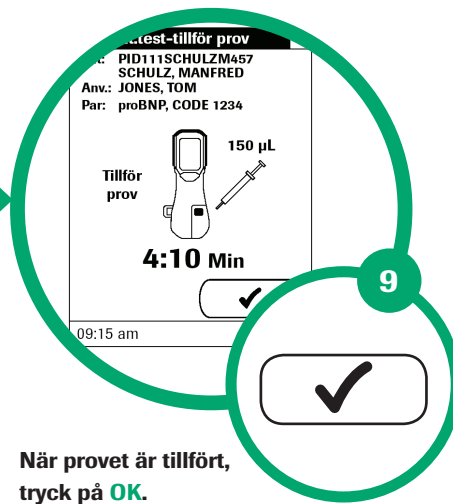

När provet är tillfört, tryck på **OK**.

Kontakta oss på telefon
08-404 88 70 för att beställa



Applicera inte mer blod. Vidrör inte testremsan förrän resultatet visas. Flytta inte instrumentet under testet.



Beställning och kontaktuppgifter

CARDIAC®	FÖRPACKNING	ARTIKELNUMMER
PARAMETER		
CARDIAC TnT	10 test	04 877 772 190
CARDIAC Myoglobin	20 test	04 877 799 190
CARDIAC CK-MB	10 test	04 877 900 190
CARDIAC D-dimer	10 test	04 877 802 190
CARDIAC proBNP	10 test	04 877 845 190

KONTROLL		
CARDIAC Control TnT	2 x 1 ml	04 890 515 190
CARDIAC Control Myoglobin	2 x 1 ml	04 890 469 190
CARDIAC Control CK-MB	2 x 1 ml	04 890 426 190
CARDIAC Control proBNP	2 x 1 ml	04 890 493 190
CARDIAC Control D-dimer	2 x 1 ml	04 890 523 190
CARDIAC IQC		04 880 668 190

TILLBEHÖR		
CARDIAC pipettes 150 µl	20 st	11 622 889 190

INSTRUMENT		
cobas h 232 instrument		04 901 142 190
Base Unit		04 805 658 001
Power supply		04 805 666 001
Battery Pack		04 805 640 001
Sample application cover		04 990 315 001
Manual	CD skandinavisk	04 880 820 001
Manual		04 880 889 001

KONTAKTA OSS PÅ TELEFON 08-404 88 70 FÖR ATT BESTÄLLA