

# Snabbguide

STEG

**1****Ta ett urinprov**

**Doppa** spetsen på kapillärröret i urinprovet till en nivå precis ovanför stärkelsepluggen.



STEG

**2****Rengöra kapillärröret**

**Torka** sidan av kapillärröret med en servett.



STEG

**3****Sätta i kapillärhållaren**

**För in** kapillärhållaren i en kassetten (platta sidan mot kassetten) tills hållaren låses fast.



STEG

**4****Läsa av kassetten**

1. **Håll** kassetten så att streckkoden är riktad åt höger.
2. **För in** kassetten i streckkodsskåran över pricken.
3. **Skjut** kassetten snabbt och försiktigt nedåt. Ett **pip** och ett förändrat utseende på skärmen innebär en lyckad avläsning. Upprepa om det inte lyckas.



## Snabbguide

STEG  
5

## Sätta i kassetten

1. **Håll** kassetten så att streckkoden är riktad åt höger.
2. **Öppna** luckan och **för in** kassetten i facket tills ett klick hörs.
3. **Tryck ned** pistongen i kassetten.
4. **Dra** loss fliken sakta och med fast hand.
5. **Stäng** luckan, så påbörjas analysen.

STEG  
6

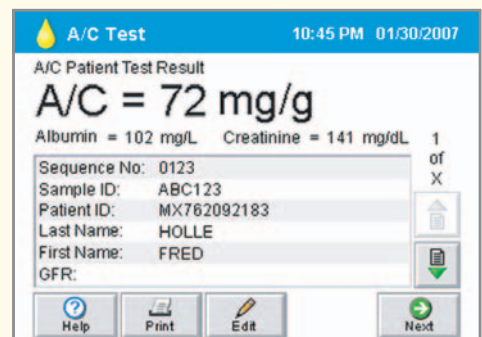
## Registrera Patient ID

1. **Välj** Patient ID
2. **Skriv in** Patient ID
3. **Tryck** på ange
4. **Tryck** på nästa

STEG  
7

## Skriva ut resultaten

1. **Vänta** tills testet är slutfört (ungefär 7 minuter).
2. **Skriv ut** resultaten från skärmen.

STEG  
8

## Ta ur kassetten

1. **Tryck ned** knappen på höger sida.
2. Med vänster hand **trycker** du fliken på kassetten till höger så att den låses upp.
3. **Dra** ut kassetten.
4. **Kassera** kassetten för att förhindra skada eller eventuell kontamination.

