

Ängelholm 4 november 2014

Desinficering av HemoCue instrument

Följande rekommendationer gäller som förebyggande infektionsvägledning angående smittsamma blodburna patogener, såsom ebolaviruset, och är utgivet av the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA och Världshälsoorganisationen (WHO).

Vi rekommenderar att HemoCue instrument och kuvetthållare desinficeras genom att torka av dem med 70 % etanol.

Rengör först utsidorna på instrumentet enligt bruksanvisningen och torka därefter av ytorna med 70 % etanol.

Kuvetthållaren ska avlägsnas från instrumentet, rengöras enligt bruksanvisningen och sedan torkas av med 70 % etanol.

Använd först därför avsedd rengöringsspatel för rengöring av de optiska delarna, fortsatt sedan med en luddfri bomullstopp (utan tillsats) fuktad med 70 % etanol. Se till att bomullsoppen inte fuktas med för mycket etanol.

Instrumentet och kuvetthållaren får inte desinficeras med natriumhypokloritlösning. Utsidorna på instrumentet kan påverkas om man rengör med natriumhypokloritlösning (missfärgning) och glaset och optiska enheter kan bli obrukbara.

All utrustning som kommer i kontakt med blod ska hanteras som potentiellt smittbärande enligt universella försiktighetsåtgärder och god labororiesed.

Med vänlig hälsning
HEMOCUE AB



Pia Werndrup, Ph.D
Medical Advisor