

Dokumenttyp:	Arbetsinstruktion
Dokumentnamn:	Equalis Mononukleos, analys och rapport

ANALYSER

S-MONO

KONTROLLHANTERING

Kontrollen består av serum och handhas på samma sätt som patientprov. Om provet inte kan analyseras på ankomstdagen bör det förvaras i kyl till nästa analystillfälle.

KONTROLLFREKVENNS

4 prover per utskick, 1 gång per år.

REGISTRERING AV KONTROLLEN I LIS (endast länslab)

Länslaboratorier registrerar proverna i LVMS.

Sample Id: Märk kontrollen med lidnummer från pappersremiss

	Gällivare	Kalix	Kiruna	Piteå
Patient:	GEK EXTK	KXK EXTK	KAK EXTK	PEK EXTK
Beställare:	QC	QC	QC	QC

Prov Datum: t (analys datum)

Extern kommentar till provet: ange kontrollens namn och analysomgång.

Hälsocentraler använder inte LVMS, och registrerar därför resultaten endast på Equalis hemsida, se nedan. För spårbarhet kan resultat noteras i [Loggblad Mononukleos](#).

INSTRUMENT

Manuellt snabbtest, Nadal Mononucleosis Test från Nal von Minden GmbH.

UTFÖRANDE

Externa kvalitetskontroller hanteras som om de vore patientprover, se metodbeskrivning [Mononukleos B S P](#). Se till att kitkontroller är utförda innan externa kvalitetskontroller rapporteras för att säkerställa att metoden fungerar tillfredsställande.

KONTROLLRAPPORTERING

Besvaras på Equalis hemsida <http://www.equalis.se>. Kontrollera att resultaten rapporteras på korrekt metod.

Rapport kommer efter någon vecka och hämtas på Equalis hemsida. Alla lab kan själva hämta in sina resultat, och metodansvarig i Sunderbyn sammanställer en gemensam rapport som publiceras i centuri. Vid avvikelser kontaktas PNA-koordinator.