


Provtagning snabbguide f-Hb

Svenska

CTK OnSite FOB

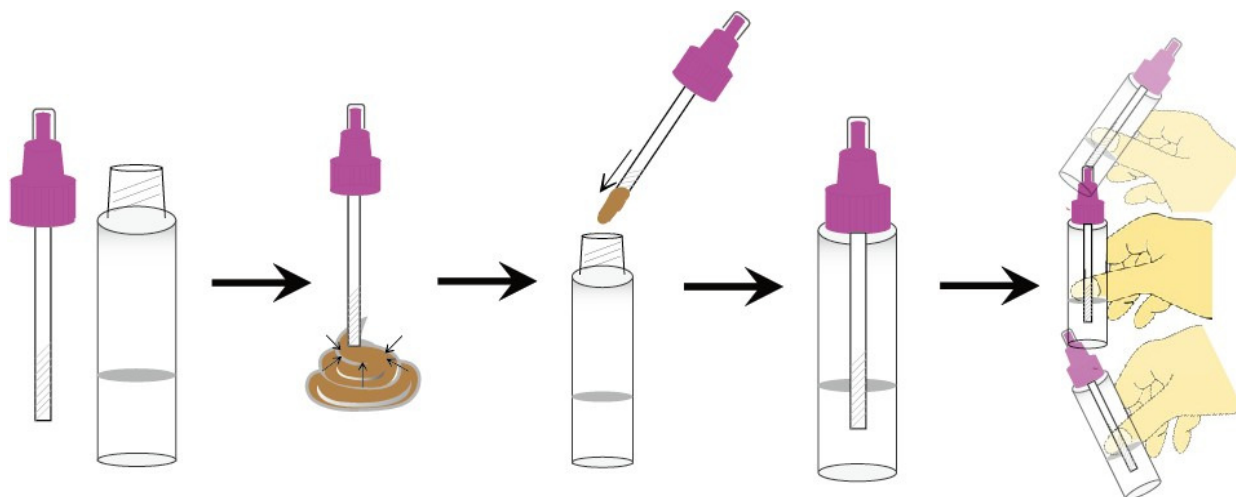

Skruva av toppen med provtagningspinnen i.	Doppa provtagningspinnen på 5 olika ställen i avföringsprovet.	För åter provtagningspinnen med prov in i buffetröret. Obs! Endast prov som fastnat på pinnen, inga extra klumpar.	Skruva på locket så att röret försluts helt igen.	Skaka kraftigt röret med prov i för att blanda helt.
---	---	---	--	---

Efter provtagning:

Märk röret med namn, personnummer och provtagningsdatum, skicka/lämna röret till laboratoriet för analys. Provet kan förvaras i rumstemperatur i högst 10 dagar, eller i kylskåp i högst 21 dagar, innan analys måste utföras

XboXLlab

www.xboxlab.se

 **CTK BIOTECH**
SIMPLIFYING DIAGNOSTICS

2020