

QuikRead go[®] CRP

Kort bruksanvisning



1

Öppna kyvetten och tillsätt 20 µL prov.

Prov kan förvaras i kapillären i 15 minuter innan analys utförs.



2

Sätt på reagenskorken ordentligt.

Provet kan förvaras i 2 timmar innan analys utförs.



3

Välj *Analysera* på displayen.



4

Sätt i kyvetten med streckkoden vänd framåt.

Analysen utförs automatiskt.



5

När analysen är klar, ≤ 2 min, visas resultatet på displayen.

För utförlig metodbeskrivning, se inlagan i förpackningen.

ORION
DIAGNOSTICA

Orion Diagnostica AB, Box 520, 192 05 Sollentuna
Tfn: 08-623 64 40, Fax: 08-623 64 80, www.oriondiagnostica.se

QuikRead go[®] CRP

Reagensförvaring



Öppnat kit

Förvara i 2–8 °C:
hållbar till utgångsdatum



Öppnat kyvettställ i innerförpackning

Förvara i 2–25 °C:
hållbar till utgångsdatum



Öppnad kyvett utan innerförpackning

Förvara i 2–8 °C:
hållbar i 6 månader

Förvara i 18–25 °C:
hållbar i 3 månader



Reagenskorkar

Förvara i 2–8 °C:
hållbar till utgångsdatum

Förvara i 18–25 °C:
24 timmar/dag; hållbar 1 månad

Förvara i 18–25 °C:
7,5 timmar/dag; hållbar 3 månader



Öppnad kyvett

Analys måste utföras inom
två timmar efter att kyvetten
öppnats.

Låt buffertvätskan bli rums-
tempererad innan analys utförs.



QuikRead CRP kontroll QuikRead go CRP hög kontroll

Oöppnad flaska:
hållbar till utgångsdatum i 2–8 °C

Öppnad flaska:
hållbar i 2 månader i 2–8 °C

Låt kontrollen bli rumstempererad
innan analys utförs.

